

FICHA TÉCNICA

PEROXY RICCEL

DESINFETANTE HOSPITALAR



PROPRIEDADES:

PEROXY RICCEL é um Desinfetante Hospitalar e Limpador que foi desenvolvido para obter a máxima eficiência de seus componentes. É um produto de fácil aplicação, sem odor e corantes, sem efeito corrosivo, compatível com o meio ambiente, não agressivo à saúde dos usuários e também não gera substâncias residuais tóxicas. PEROXY RICCEL está registrado na ANVISA sob o número 326620011, que aprova seu uso em Hospitais, Clínicas Médicas e Veterinárias, Clínicas Odontológicas, Laboratórios, Indústrias Farmacêuticas e Cosméticas, Indústrias de Alimentos e qualquer outro segmento em que processos de desinfecção sejam necessários. Com a utilização do Peróxido de Hidrogênio, obtêm-se um amplo espectro de atividade microbicida, sendo eficiente contra bactérias, fungos e vírus, inclusive para esporos e microbactérias.

EFETIVIDADE:

Staphylococcus aureus	Mycobacterium avium
Salmonella choleraesuis	Mycobacterium smegmatis
Pseudomonas aeruginosa	Mycobacterium bovis
Escherichia coli	Candida albicans
Staphylococcus aureus NRSA	Tricophyton mentagrophytes
Klebsiela pneumoniae KPC	Hepatitis B (HBV), Hepatitis C (HCV)
Enterococcus faecium VRE	HIV-1; Influenza A (H1N1)
Mycobacterium massiliense	Norovirus (Feline Calicivirus)
Mycobacterium terrae	Clostridium sporogenes

INSTRUÇÕES DE USO:

Desinfecção: diluir o produto (1:40). **Para desinfecção de superfícies fixas:** lavar, enxaguar e secar a superfície. Reaplicar o produto deixando em contato por 5 minutos. Enxaguar, se necessário. **Para desinfecção de artigos não críticos:** lavar e enxaguar os artigos; imergi-los na solução deixando-os em contato por 5 minutos. Enxaguar e secar. Utilizá-los o mais breve possível. **Para limpeza pesada de pisos e superfícies em geral:** diluição 1:100. **Para limpeza diária de pisos e superfícies em geral:** diluição 1:200. Quando aplicar em pisos, isolar a área e não abrir para a circulação até que o piso esteja seco.

PRECAUÇÕES:

Irritante para os olhos e mucosas. Lavar as mãos após o uso. Em contato com os olhos, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se inalar em excesso, remover a pessoa para local bem ventilado. Não reutilizar a embalagem vazia. Não ingerir. Evitar a inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Em caso de ingestão, não provocar vômito e consultar imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico, levando o rótulo do produto.

COMPOSIÇÃO:

Peróxido de Hidrogênio, Tensoativo não iônico, Estabilizante, Quelante, Tamponante, Conservante e Água.

DADOS TÉCNICOS:

ASPECTO:	Líquido transparente
ODOR:	Inodoro
COR:	Incolor
pH:	3,5 – 4,5
DENSIDADE:	1,04 – 1,06g/cm ³
VISCOSIDADE:	9 – 11s
PRINCÍPIO ATIVO:	15%
Produto saneante registrado na ANVISA:	Nº Reg. M.S. = 326620011



EMPRESA CERTIFICADA

Atualizada em 27 de julho de 2023.